

# ProPak™ Cordón Simple

## Retracción Gingival

### *Cordón No Impregnado*

**Los cordones ProPak™ son cordones de retracción tejidos.**

**Contenido:** Cada frasco contiene 100 pulgadas (254 cm) de hilo de poliéster/nylon.

**Indicaciones de uso:** Usar cuando la retracción gingival sea recomendable en la práctica dental, como antes de la toma de impresiones con cualquier material elástico; o antes de la colocación de coronas, puentes; y durante la preparación del diente.

**Contraindicaciones:** No existen contraindicaciones conocidas para el uso del cordón ProPak™. Los componentes del cordón ProPak™ tienen una larga historia de seguridad y eficacia para los fines previstos.

**Advertencias:** Solo para uso intraoral tópico. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

#### **Precauciones:**

- Leer y seguir todas las instrucciones.
- Solo para uso profesional en consultorio.

**Cantidad a usar:** Utilizar la cantidad de cordón del tamaño apropiado necesaria para rodear completamente el cuello de cada diente a retraer, con un ligero solapamiento. Se pueden colocar dos vueltas alrededor de cada diente, si el espacio del surco lo permite.

#### **Instrucciones de uso:**

- Para un uso más efectivo del cordón ProPak™, colocar un cordón más delgado alrededor del diente y sobre el surco.
- Recortar los extremos para un ligero solapamiento y empaquetar firmemente en el surco.
- Aplicar una segunda vuelta de cordón más grueso sobre el cordón delgado de la misma manera.
- Cuando esté listo para aplicar el material de impresión, retirar solo la vuelta de cordón más grueso, dejando el cordón delgado en su lugar debajo del margen gingival hasta completar el procedimiento.
- Una vez completado el procedimiento de impresión, retirar también el cordón delgado.
- Alternativamente, una sola vuelta de cordón es suficiente.
- El cordón ProPak™ retrae completamente el tejido en cinco a ocho minutos y debe retirarse de la boca.

El cordón ProPak™ puede saturarse con geles o soluciones astringentes como los geles o soluciones Retrax de Pascal antes de su uso para mejorar la eficacia.

Las porciones dispensadas del cordón están destinadas a un solo uso y deben desecharse inmediatamente después de su uso.

Para información SDS del producto, visite el sitio web de la empresa en [pascaldental.com](http://pascaldental.com) o contacte directamente a Pascal.

El cordón ProPak™ está libre de gluten, soya, leche, huevo, maní y frutos secos. No contiene sabores artificiales.

Para más información sobre los cordones de Pascal y los materiales de retracción gingival, visite [pascaldental.com](http://pascaldental.com).

**2929 Northup Way  
Bellevue, WA 98004 EE.UU.  
425.827.4694 | 800.426.8051  
[www.pascaldental.com](http://www.pascaldental.com)**